


- 本体でイリゲーションとサクションの切り替えが可能です。
- ノズルはねじ込み式で、スムーズに交換が行えます。
- ノズルはフレキシブルに曲げられます。

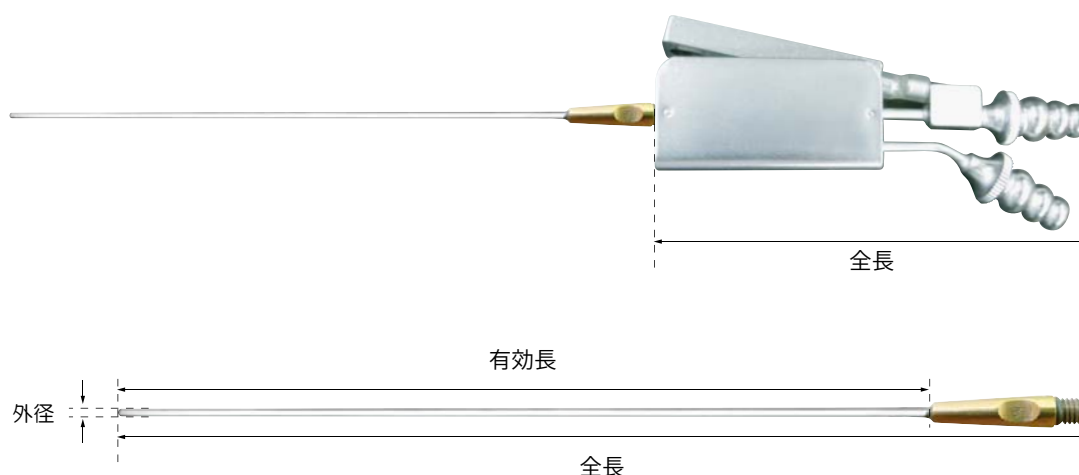

本体

品 番	全長 (mm)
KAM-02	96


KAM-02 付属ノズル

品 番	外径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)
KAM-15	φ 1.5	120	145
KAM-20	φ 2.0	120	145

使用方法

- ① 図のように、イリゲーションサクション本体の後ろから真っすぐ出ている接続口を吸引側(吸引器)に、カーブしている接続口を洗浄側(生理食塩水バック)につなぎます。
- ② 加圧バックの圧を300mmH₂Oまで加圧します。
- ③ 吸引器を作動させます。

- ・切り替えレバーを下げない時
→ 吸引管として使用できます。レバー中央にある吸引圧調節穴を指で塞ぐことにより、吸引圧を手元でコントロールできます。
- ・切り替えレバーを下げた時
→ 吸引が中断され、生理食塩水が噴き出します。

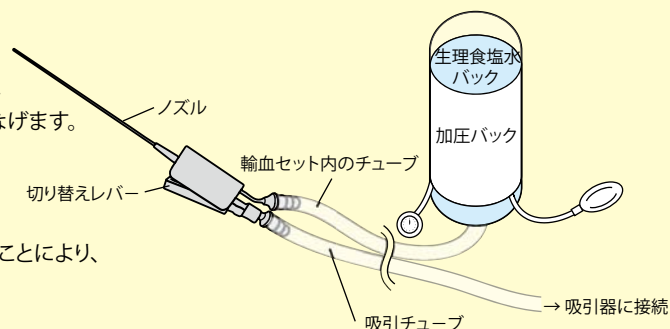

KAM-02 オプションノズル

品 番	外径(mm)	有効長(mm)	全長(mm)
KAM-15.50	φ 1.5	50	75
KAM-15.55	φ 1.5	55	80
KAM-15.60	φ 1.5	60	85
KAM-15.65	φ 1.5	65	90
KAM-15.70	φ 1.5	70	95
KAM-15.75	φ 1.5	75	100
KAM-15.80	φ 1.5	80	105
KAM-15.85	φ 1.5	85	110
KAM-15.90	φ 1.5	90	115
KAM-15.95	φ 1.5	95	120
KAM-15.100	φ 1.5	100	125
KAM-15.105	φ 1.5	105	130
KAM-15.110	φ 1.5	110	135
KAM-15.115	φ 1.5	115	140
KAM-15.125	φ 1.5	125	150
KAM-15.130	φ 1.5	130	155
KAM-15.135	φ 1.5	135	160
KAM-15.140	φ 1.5	140	165
KAM-15.145	φ 1.5	145	170
KAM-15.150	φ 1.5	150	175
KAM-20.50	φ 2.0	50	75
KAM-20.55	φ 2.0	55	80
KAM-20.60	φ 2.0	60	85
KAM-20.65	φ 2.0	65	90
KAM-20.70	φ 2.0	70	95
KAM-20.75	φ 2.0	75	100
KAM-20.80	φ 2.0	80	105
KAM-20.85	φ 2.0	85	110
KAM-20.90	φ 2.0	90	115
KAM-20.95	φ 2.0	95	120

品 番	外径(mm)	有効長(mm)	全長(mm)
KAM-20.100	φ 2.0	100	125
KAM-20.105	φ 2.0	105	130
KAM-20.110	φ 2.0	110	135
KAM-20.115	φ 2.0	115	140
KAM-20.125	φ 2.0	125	150
KAM-20.130	φ 2.0	130	155
KAM-20.135	φ 2.0	135	160
KAM-20.140	φ 2.0	140	165
KAM-20.145	φ 2.0	145	170
KAM-20.150	φ 2.0	150	175
KAM-30	φ 3.0	120	145
KAM-30.50	φ 3.0	50	75
KAM-30.55	φ 3.0	55	80
KAM-30.60	φ 3.0	60	85
KAM-30.65	φ 3.0	65	90
KAM-30.70	φ 3.0	70	95
KAM-30.75	φ 3.0	75	100
KAM-30.80	φ 3.0	80	105
KAM-30.85	φ 3.0	85	110
KAM-30.90	φ 3.0	90	115
KAM-30.95	φ 3.0	95	120
KAM-30.100	φ 3.0	100	125
KAM-30.105	φ 3.0	105	130
KAM-30.110	φ 3.0	110	135
KAM-30.115	φ 3.0	115	140
KAM-30.125	φ 3.0	125	150
KAM-30.130	φ 3.0	130	155
KAM-30.135	φ 3.0	135	160
KAM-30.140	φ 3.0	140	165
KAM-30.145	φ 3.0	145	170
KAM-30.150	φ 3.0	150	175

製造販売元

 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

CA21060726