


製造元: PMT Corporation (アメリカ)
製造販売届出番号: 13B1X00167000246

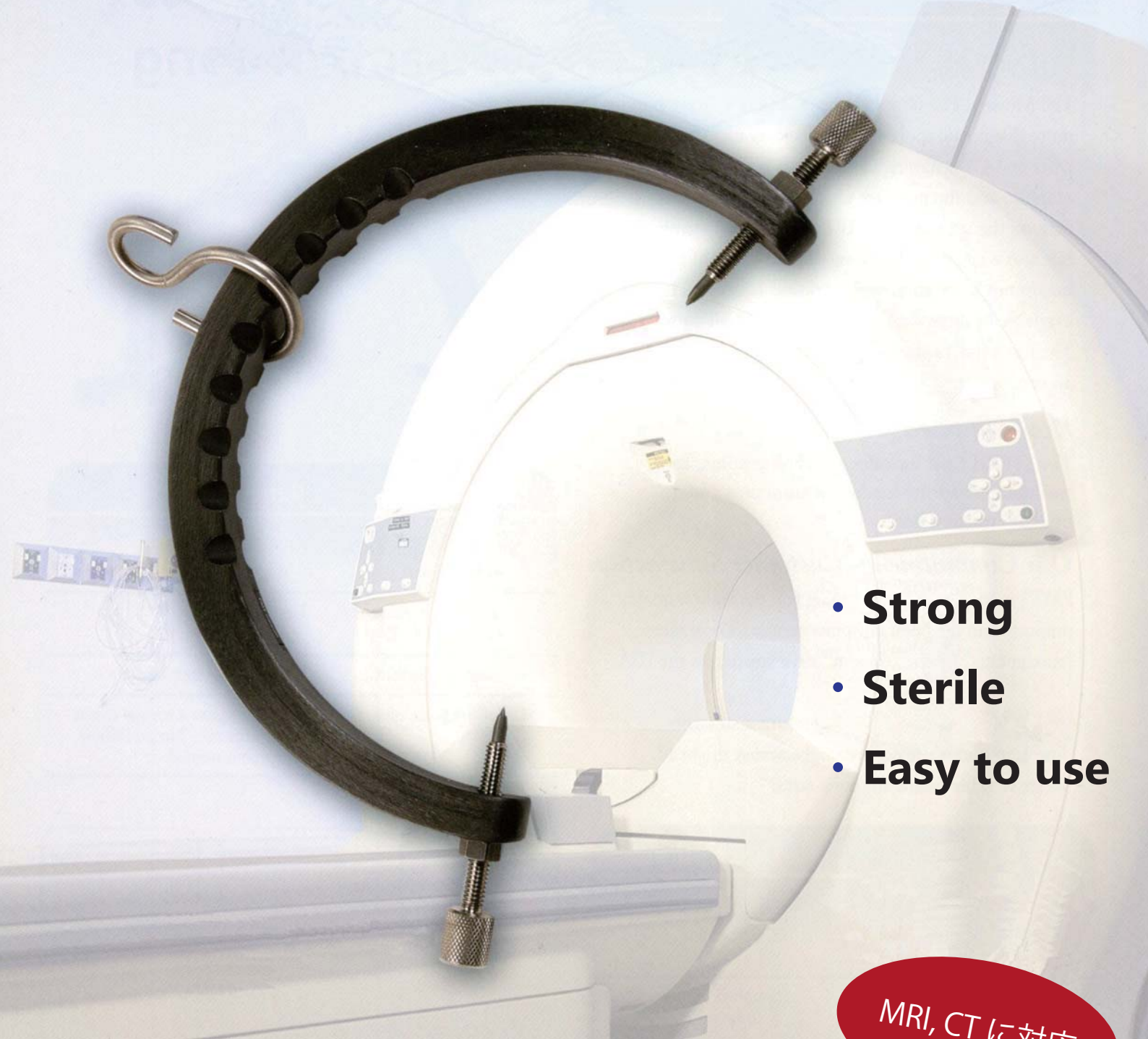

- **Strong**
- **Sterile**
- **Easy to use**

MRI, CT に対応

特長

- カーボン・グラファイト製の軽量 MRI/CT 対応フレームです。
- 頭蓋骨ヘドリリングなしで直接、容易に素早く装着できます。
- スプリング内蔵のチタン製ヘッドピンにより、常に安定した頭蓋固定力が得られます。




使用方法

- ① 直接フレームを頭蓋骨に取り付けます。
- ② スプリングピンを前進させ、スプリングインジケーターが 1mm 突出するよう調整します。
- ③ フレームを前後に 2～3 回傾け、スプリングピン先端の座りを良くし、インジケーターの数値（1mm 突出）を再確認します。
※ 再滅菌、再使用はしないでください。

適切なサイズを選択するために

耳の上約 1cm の位置で、患者様の頭部横幅（図中の赤ライン参照）を計測し、右の表を参考にして、使用するフレームサイズをご選択いただけます。

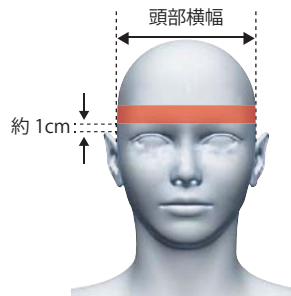

サイズ	頭部横幅
S	10～15cm
M	12～18cm
L	13～19cm

Features	Benefits
1. チタン製スカルピン付のカーボングラファイト牽引器	MRI & CT に対応 ※ MRI 条件：1.5 もしくは 3.0 テスラ
2. 3つのサイズ (S, M, L) をご用意	どんな患者様にもフィット
3. 滅菌済みフレーム	緊急時すぐに使用可能 ※ S 字フックおよびナット用スパナは滅菌されていません
4. セルフプレッシャーピン	トルクドライバーや調整が不要

Order Information

品番	品名	構成品内訳
1210-2	PMT 頭蓋牽引器 (S サイズセット)	フレーム (S)① / S 字フック① / ナット用スパナ① / スカルピン (2.5 インチ) セット (スプリングピン, ブランクピン) ①
1210-4	PMT 頭蓋牽引器 (M サイズセット)	フレーム (M)① / S 字フック① / ナット用スパナ① / スカルピン (3 インチ) セット (スプリングピン, ブランクピン) ①
1210	PMT 頭蓋牽引器 (L サイズセット)	フレーム (L)① / S 字フック① / ナット用スパナ① / スカルピン (2.5 インチ) セット (スプリングピン, ブランクピン) ①

製造販売元

OHWA 欧和通商株式会社

本社 TEL:03(5803)7172 FAX:03(5803)7185
 東京営業所 TEL:03(3813)8201 FAX:03(3813)8204
 大阪営業所 TEL:06(6304)9305 FAX:06(6304)9576
 福岡営業所 TEL:092(526)3618 FAX:092(526)3148
 札幌営業所 TEL:011(708)7725 FAX:011(708)7868
<http://www.ohwa-tsusho.com>
 第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

取扱店