

製造元：Argon Medical Devices, Inc. (アメリカ)
製造販売届出番号：13B1X00167000037




vessel-cludeは血管を一時的に閉塞するための器具です。

- 血管を保護しながらオクルージョンできます。
- オクルーダーチューブの長さは3種類ありますので、術野の妨げにならないよう使い分けできます。
- 滅菌済ピールバッグ包装になっています。


1箱 (1個 × 10袋) / EO滅菌済

品番	品名	規格
046-1-110	ヴェッセル・クルード (小)	オクルーダーチューブの長さ：50mm
046-1-120	ヴェッセル・クルード (中)	オクルーダーチューブの長さ：100mm
046-1-130	ヴェッセル・クルード (大)	オクルーダーチューブの長さ：150mm

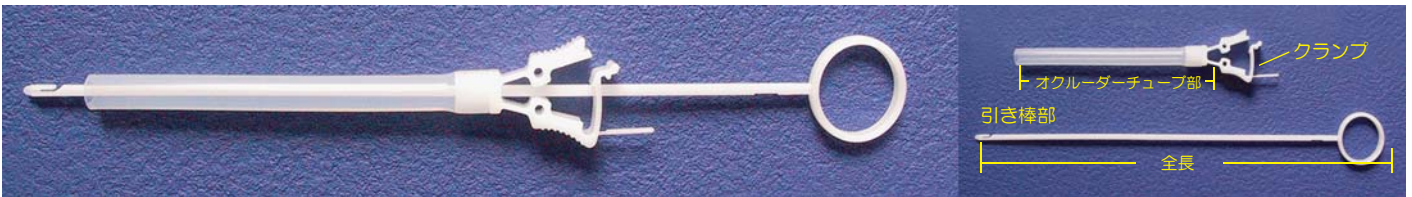


【操作方法】


外科手術の際に血管を適宜剥離し、テープを血管周囲にとおして巻きつけ、オクルーダーチューブ内に引き込むことにより血管を一時的に閉塞します。

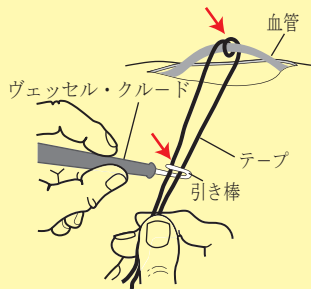

- ① 目的とする組織にテープを巻き付け、引き棒をかける。

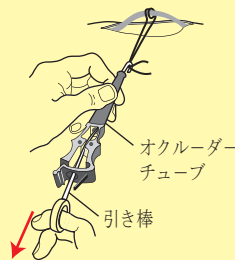

- ② 引き棒を引いてテープをオクルーダーチューブの中に引き込む。

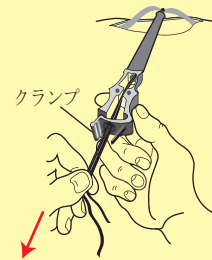

- ③ 引き棒を取り外しテープを引いて閉塞に必要な最低張力のところでクランプする。

製造販売元

OHWA 欧和通商株式会社

本社 TEL: 03(5803)7172 FAX: 03(5803)7185
 東京営業所 TEL: 03(3813)8201 FAX: 03(3813)8204
 大阪営業所 TEL: 06(6304)9305 FAX: 06(6304)9576
 福岡営業所 TEL: 092(526)3618 FAX: 092(526)3148
 札幌営業所 TEL: 011(708)7725 FAX: 011(708)7868

<http://www.ohwa-tsusho.com>

第1種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00167

取扱店