

製造元：Argon Medical Devices, Inc. (アメリカ)
届出番号：13B1X00167000037




ヴェッセルクルードは血管を一時的に閉塞するための器具です。

- オクレーダーチューブの長さは3種類ありますので、術野の妨げにならないよう使い分けできます。
- 滅菌済ピールパック包装になっています。


1箱 (1個 x 10袋) / EOG滅菌済

品番	品名	規格
046-1-110	ヴェッセル・クルード(小)	オクレーダーチューブの長さ:50mm
046-1-120	ヴェッセル・クルード(中)	オクレーダーチューブの長さ:100mm
046-1-130	ヴェッセル・クルード(大)	オクレーダーチューブの長さ:150mm

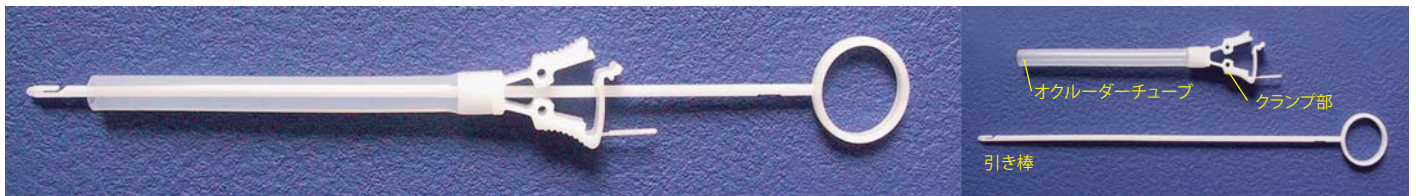

【使用例】


テープを血管周囲に通して巻きつけ、オクレーダーチューブ内に引き込むことにより、血管を一時的に閉塞します。

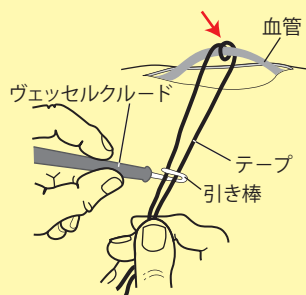

- ① 目的とする血管にテープを巻き付け、引き棒をかける。



- ② 引き棒をゆっくりと手前に引いて、テープをオクレーダーチューブの中に引き込む。

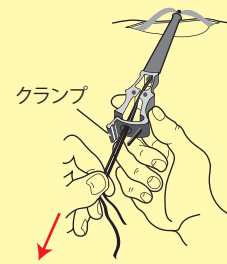

- ③ 引き棒を取り外し、テープを手前に引いて閉塞に必要な最低張力の所で、クランプ部を操作して保持する。

製造販売元

 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。